

BRUKSANVISNING

Hjälpmedel: Easy-Up®

400-serien

Enheter:

EB-450 (batteridrivnen)

ER-450 (uppladdningsbar)

EB-470 (batteridrivnen)

ER-470 (uppladdningsbar)



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.) INTRODUKTION	3
2.) ÖVERSIKT - SYFTE OCH TILLÄMPNING	3
3.) DOKUMENTATION OCH INFORMATION.....	5
4.) EASY-UP MODELLER	5
5.) BÖRJA ANVÄNDA EASY-UP	6
6.) TEKNISKA SPECIFIKATIONER	8
7.) RETUR / REPARATION / FEL / GARANTI	8
8.) SÄKER AVFALLSHANTERING	8
9.) CERTIFIERINGAR	9

Varumärken

Varumärken, upphovsrätter och patent skyddar olika typer av immateriella rättigheter. Varumärken skyddar våra varumärken och företagslogotyper som används på våra enheter, förpackningar och marknadsföringsmaterial (inkl. vår hemsida). Upphovsrätten skyddar detta användarmanual.

Patent skyddar våra uppfinningar. Våra varumärken omfattar bland andra HandiGood®, Easy-Up®, Easy-Drink™, Easy-Warm™, Easy-Ring™, Easy-Egg™, Easy-Open™, Easy Square™ och Easy-Release™.

HandiGood produkter tillverkas i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS Direktiv 2006/42/EG, lågspänningsdirektivet 2014/35 / EU (tidigare 95/16 / EC) och EMC-direktivet 2014/30 / EU (tidigare: 2004/108 / EG) - om elektromagnetisk kompatibilitet - angående "elektriskt brus" från maskiner, apparater och annan utrustning.

1. Introduktion

Välkommen till Easy-Up bruksanvisning. Den är utformad för att ge dokumentation till personer i alla åldrar som vill använda en Easy-Up då och då eller dagligen/regelbundet. Detta dokument är utformat för att läsas av alla användare av vår HandiGood Easy-Up (inkl. produkttillbehör) eftersom de flesta användare förstår funktionerna som dokumenteras här. Reparationer, underhåll och korrekt avfallshantering av produkten täcks också av separata avsnitt av denna guide.

2. Översikt - Syfte & Tillämpning

HandiGood är ett elektronikföretag som designar, utvecklar och säljer hjälpmedel. HandiGood grundades av den danske uppfinnaren John Jensen i oktober 2014. Efter en operation och tre veckors förbud mot att använda sin högra hand, fick John Jensen en idé. Han behövde något för att underlätta att t.ex. öppna en burk, röra i en kastrull etc med bara en hand. Men det fanns inga lämpliga hjälpmedel tillgängliga på marknaden. Resultatet blev Easy-Up, som blev starten för företaget HandiGood. Idag har vi ett nära samarbete med organisationer som är dedikerade till att berika livet för personer med funktionsnedsättning genom ett meningsfullt arbete. Easy-Up är stolt utrustat med kvalitetsmärket "Danish Design" och "Made in Denmark" och tillverkas av HandiGood på vår skräddarsydda och mobilitetsvänliga fabriksanläggning i Spøttrup på Jylland i Danmark.

Våra Easy-Up hjälpmedel är speciellt utvecklade för att underlätta livet för människor som har svårt att utföra aktiviteter i vardagen. Easy-Up främjar även ett hälsosamt och oberoende åldrande:

- Lämplig för personer/äldre med nedsatt handfunktion och rörlighet såsom människor som har drabbats av stroke eller artros i händerna
- Lämplig för personer/äldre med nedsatt minne och handfunktioner
- Lämplig för personer/äldre med nedsatt rörlighet för att undvika olyckor i hemmet
- Lämplig för personer/äldre med nedsatt handfunktion, t.ex. efter stroke, artros

Parkinsons sjukdom, etc

Easy-Up underlättar livet på en rad områden:

- Multifunktionalitet för öppning av burkar och andra förpackningar
- Minskar risken för olyckor i hemmet när man ska skruva på lock etc, när man ska hålla över från en förpackning till en annan

Easy-Up förbättrar säkerheten och underlättar tillvaron, vilket är viktigt för människor med funktionshinder/äldre, anhöriga och omsorgspersonal.

OBS! Vi rekommenderar alltid att du konsulterar din arbetsterapeut för bedömning innan du bestämmer dig för att använda Easy-Up.

Easy-Up är flaggskeppet i vårt breda utbud av hjälpmedel för dagliga aktiviteter. Sedan 2014 har Easy-Up medverkat till ett bättre liv på många områden:

- Seniorer, äldre/reumatisk värk
- o Har du tappat styrkan i armen och/eller handen?
- o Har du reumatism som orsakar dig smärta, ömma leder och svårigheter att öppna förpackningar eller svårigheter med att hålla i en skål medan du rör om / blandar din mat?
- o Är du i behov av hjälp av dina barn, barnbarn, grannar eller omsorgspersonal?
- o Vill du klara saker själv?
- Personer med fysiska funktionshinder
- o Är du förlamad?
- o Lider du av muskelförtvining, spasmer eller liknande?
- o Är du mycket beroende av andras hjälp?
- o Är du irriterad över att inte klara av vissa uppgifter?
- o Skulle du vilja hantera fler saker på egen hand och vara mer självständig?
- o Vill du ha en lättare vardag med högre livskvalitet?
- Livet efter en olycka
- o Har du tappat styrkan i dina armar eller händer efter att ha varit i en olycka?
- o Har du skadat eller tappat en arm, hand eller finger?
- o Kan du inte längre göra det du brukade?
- o Är du beroende av hjälp från andra?
- o Skulle du vilja hantera vissa saker på egen hand efter din olycka?
- Allmän säkerhet i hemmet, t ex att se till att barn är säkra i köket (i hantering av varma grytor etc.)
- o De flesta barnfamiljer vet hur det känns att "sakna" en extra hand i handen köket under matlagning, bakning, etc.
- o Hur undviker man att välta en kastrull eller en skål, att man bränner sig eller spiller varma vätskor på barn i närheten?
- o Hur rör man i en kastrull, gör potatismos, vispar grädde och förbereder varm choklad med barn runt omkring sig?
- o Hur gör man det lugnare mer avkopplande att ha barn med sig i köket och i allmänhet runt om i hemmet?

Oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte, har varit med om en olycka, är äldre eller om du bara vill att dina barn ska lära sig om hemsäkerhet och att de ska vara säkra i och omkring köket kan HandiGoods Easy-Up definitivt hjälpa dig med att:

- Baka och blanda ingredienser i alla typer av skålar i många storlekar, med bara en hand
- Laga och röra i alla typer av kastruller och kastruller, med bara en hand
- Undvika att välta skålar och slow cookers då de är fästa på den värmetåliga Easy-Up plattformen
- Öppna alla typer av burkar och behållare med lock med bara en hand.
- Öppna mjölkkartonger, juiceflaskor, läsk, kannor och flaskor med en hand
- Lätt att öppna många olika typer av skruvlock
- Skala ett ägg med tillbehörskoppen Easy-Egg med bara en hand
- Förenkla öppning av svåröpnade livsmedelsförpackningar

- Sätt in varma matbrickor i ugnen och ta ut dem igen (Easy-Grip) så att du kan njuta av dina måltider utan problem och utan att bränna dig.
- Bli mer självständig rent generellt
- Öka din övergripande livskvalitet

HandiGood har utvecklat Easy-Up i syfte att förbättra livskvaliteten för alla människor som använder produkten. När man blir äldre minskar den fysiska förmågan och förmågan att klara sig själv minskar gradvis. Det finns idag många hjälpmedel som kan hjälpa till att kompensera detta och bibehålla ett funktionellt oberoende trots fysisk och kognitiv försämring. Omsorgspersonal kan utifrån äldres behov föreslå lämpliga hjälpmedel för att göra det möjligt för att äldre att kunna leva säkert och självständigt och på så sätt förbättra självförtroende, självuppfattning och egenvårdsförmåga.

3. Dokumentation och information

3.1 Internet

Den senaste versionen av dokumentationen finns tillgänglig på följande adress: <https://handigood.com>

3.2 Dokumentation, bruksanvisning och teknisk information kan beställas genom att kontakta Hjälpmedelsteknik Sverige AB 040-410780 eller via e-mail info@hjalpmedelsteknik.se

3.3 Återkoppling på dokumentation Om du har synpunkter på produktdokumentation på internet kontakta oss gärna. Vi uppskattar alla kommentarer.

4. Easy-Up-modeller

Easy-Up-produktsortimentet - närmare bestämt 400-serien - består av en huvuddel i ett tåligt ABS-skal som innehåller en vakuumpump.

Det finns både batteridrivna och uppladdningsbara versioner.

- EB-450- och EB-470-modellerna inkluderar:
 - o Huvuddelen, 9V batteri, klar att använda.
- ER-450- och ER-470-modellerna inkluderar:
 - o Huvuddel, batteri (laddningsbart), en AC/DC-laddare:
 - In: AC 100 ~ 240V 50/60 Hz 0,5A max.
 - Ut: DC 12V --- 1000mA

4.1 Tillbehör

	EE-400 Easy-EggTM	1 ägghållare så att man enkelt kan skala ett ägg
	EW-400 Easy-WarmTM	Set med 2 silikonringar för varma kastruller, stekpannor etc. (max. 200 °C)
	ED-400 Easy-DrinkTM	Set med 2 koppar för flaskor + 1L (Tetra Förpackning), 330mL och 1/2L flaskor
	ER-400 • Easy-ReleaseTM	Innovativt verktyg för att enkelt och lätt ta bort vakuum i glasburkar
	EM-400 Easy-MiniTM	Set med en med ring för att hålla fast t.ex. tablettburkar och en kvadratisk form för att hålla till exempel smör och andra förpackningar på plats

	EC-400 • Easy-Cover™	Set med fem dukar som skyddar din Easy-Up så den inte blir kladdig
---	-----------------------------	--

4.2 Funktioner Vakuumprocessen startas genom att slå på enheten med strömbrytaren. Easy-Ups neoprenyta suger fast botten på det fästa föremålet och samtidigt på underlaget. Medan pumpen är igång bibehålls detta vakuum, varför föremålet hålls på plattformen och Easy-Up sitter stabilt på underlaget. För att bryta vaccumgreppet, stäng helt enkelt av den inbyggda pumpen med strömbrytaren och föremålet kommer att släppas (omedelbart på EB-470 och ER-470 och efter tre (3) sekunder för modellerna EB-450 och ER-450)

5. Börja använda Easy-Up

5.1 Uppackning och förberedelse

5.1.1 Ta ut Easy-Up-enheten ur kartongen.

5.1.2 Ta bort det yttre omslaget och allt annat förpackningsmaterial som skyddar produkten under transport (som folie, fyllningsmaterial, buntband etc.)

5.1.3 Kontrollera innehållet i förpackningen.

5.1.4 Kontrollera enheten för eventuella transportskador för att undvika risker.

Skulle det oväntat visa sig att innehållet i kartongen är ofullständig eller att det finns synliga skador på produkten, använd inte produkten, utan kontakta istället din lokala återförsäljare

5.2 Användning av Easy-Up EB-450 och EB-470 (batteridrivna versioner) Enheten drivs av ett 9V batteri, som redan är isatt på fabriken.

5.2.1 Drift

5.2.1.1 Användning

1. Slå på enheten på strömbrytaren. Om du kan höra motorn gå är enheten redo att användas. Stäng av enheten.
2. Placera föremålet på plattformen så att det täcker hålet.
3. Slå på din strömbrytaren. Du kommer nu att höra vakuumpumpen sätta igång och sugprocessen börjar. Efter ett ögonblick sitter objektet fast på enhetens yta. OBS! Du kan hjälpa vakuumsystemet genom att försiktigt trycka ner ovanpå föremålet med ett finger eller din handflata, för att därigenom lättare fästa föremålet på plattformen.
4. Efter användning • Stäng av enheten så avbryts sugprocessen. Objektet kan nu tas bort från plattformen (omedelbart på EB-470 och ER-470 och efter tre (3) sekunder för EB-450 och ER-450). 5.2.1.
5. Byte av batteri Om du upptäcker att enheten tappat prestanda är det troligt att batteriet måste bytas ut.

Procedur:

- a. Ta bort det rektangulära batterilocket undertill med en stjärnskruvmejsel.
- b. Sätt i ett nytt 9V-batteri (använd ett långvarigt litiumbatteri för optimal prestanda).
- c. Stäng och lås fast batterifacket med en stjärnskruvmejsel.
- d. Slå på enheten. Om du hör motorn gå är enheten redo att användas.

5.3 Användning av Easy-Up ER-450 och ER-470 (uppladdningsbara versioner). Enheten drivs av ett 8,4V Ni-MH-batteri storleken på ett 9V-blockbatteri, vilket redan är installerat vid leverans.

- a. Ta bort det rektangulära batterilocket undertill med en stjärnskruvmejsel.
- b. Sätt i ett nytt 9V-batteri (använd ett långvarigt litiumbatteri för optimal prestanda).
- c. Stäng och lås fast batterifacket med en stjärnskruvmejsel.
- d. Slå på enheten. Om du hör motorn gå är enheten redo att användas.

5.3.1) Drift

1. Slå på enheten på strömbrytaren. Om du kan höra motorn gå är enheten redo att användas. Stäng av enheten OBS! För maximal drifttid efter första uppstart rekommenderas att du laddar enheten helt.
2. Placera föremålet du vill låsa fast på plattformen så att det täcker hålet i mitten.
3. Slå på din Easy-up genom att trycka på strömbrytaren på sidan.
Du kommer nu att höra vakuumpumpen träda i kraft och sugprocessen börjar.
Efter ett ögonblick fästs objektet fast på enhetens yta.
OBS! Du kan hjälpa vakuumsystemet genom att försiktigt trycka ner ovanpå föremålet som ska sättas fast med ett finger eller handflatan, för att därigenom lättare fästa föremålet på plattformen.
Enheten kan användas under laddning. Laddningstiden ökar något men laddningsprocessen är klar efter maximalt 2 timmar.
4. Efter användning Stäng av enheten och sugprocessen avbryts.
Objektet kan nu tas bort från plattformen (omedelbart på EB-470 och ER-470 och efter tre (3) sekunder för EB-450 och ER-450).

5.3.2 Begränsningar

Easy-Up är avsedd för att fästa föremål i standardförpackningar som burkar, glas, flaskor, behållare för drycker, köksredskap och liknande.

Enheten får endast användas under säkra förhållanden för att undvika faror. All annan användning än den som anges i bruksanvisningen betraktas som felaktig.

5.3.3 Grundläggande begränsningar

- Easy-Up får inte användas i ett synbart defekt skick, t.ex. med en trasig kåpa.
- Easy-Up ska inte användas om det finns några tvivel om resultatet av en viss applikation.
- Easy-Up får inte användas utan avbrott.
- Easy-Up får inte användas för att fästa kroppsdelar.
- Easy-Up får inte diskas i diskmaskin
- Easy-Up får inte användas på en varm spis, i en varm ugn eller i mikrovågsugn.
- Easy-Up får inte användas för att absorbera vätskor.
- Easy-Up får inte användas medicinskt
- Easy-Up får inte användas i kontakt med brandfarliga och/eller explosiva vätskor.
- Easy-Up får inte användas av barn utan uppsikt av vuxen.
- Easy-Up är inte avsedd för kommersiellt bruk.

5.4 Ytterligare begränsningar

5.4.1 Användningsyta För optimal användning måste Easy-Up placeras på en plan, ren och torr yta.

5.4.2 Den horisontella lutningen under användning bör inte överstiga 5 grader

5.4.3 Belastning

- Easy-Up kan användas med upp till 5 kg belastning
- Silikonringarna (Easy-Warm) får inte användas till föremål med en temperatur över 200 °C.

5.4.4 Rengöring

- Easy-Up ska endast rengöras när den är avstängd.
- Easy-Up får inte tas isär
- Vid defekt måste enheten skickas till tillverkaren för reparation/byte.

5.4.5 Drift

- Easy-Up får inte användas av personer som inte har läst och förstått bruksanvisningen
- Livslängd HandiGood rekommenderar att silikonringarna (Easy-Warm och Easy-Ring) som placeras på sugplattformen, byts ut årligen för att säkerställa en adekvat drift
- Easy-Up kan användas vid temperaturer mellan 10 och 40 grader Celsius
- Easy-Up är utvecklad för inomhusbruk, utomhusbruk rekommenderas inte
- Får inte användas i explosiva eller andra farliga förhållanden

6. Tekniska specifikationer

Vikt [kg]: 0,4

Mått (Ø x h) [mm]: 165 x 42

Brukstemperaturer [° C]: 10 till 40 ° Bulleremission [dB (A)]: 79 dB (A)

Tryckgenerering (vakuum): -50 Kpa

EB-450 / EB-470 Batteri 9V 6LR61

ER-450 / ER-470 Batteri (uppladdningsbart) 8,4V i 9V 6LR61-format 7.)

7. Retur / reparation / felfunktion / garanti

Om produkten behöver repareras, vänligen kontakta oss innan produkten skickas. Härefter du kommer att tilldelas ett reparationsnummer (servicebiljett) och en leveransadress före leverans.

7.1) Instruktioner för retur anges per. Kontakt. Hjälpmedelsteknik Sverige AB Tel. 040-41 07 80 mån-fre 08:00:00 till 17:00. Obs: Enheter som skickas till för reparation utan ett tidigare tilldelat reparationsnummer kommer inte att behandlas och kommer att returneras med fraktavgift.

7.2) Garanti Garantin omfattar material- och tillverkningsfel och gäller i 24 månader från leveransdatum. Garantianspråken är inte överlåtbara och kan endast utövas av den ursprungliga köparen av produkten. Garantin är ogiltig i följande fall: Felaktig användning av enheten; felaktig drift eller idrifttagande, självmontering och reparation av enheten, drift av enheten med ickekompatibel nätspänning, bristande efterlevnad av bruksanvisningen, force majeure or normalt slitage. Felaktig användning kan leda till skador på komponenter i enheten, vilket kan resultera i minskning eller försämring av enhetens säkerhet. Tillverkaren avvisar garanti- och ersättningsanspråk i händelse av personskada eller egendomsskada om detta beror på felaktig användning eller bristande efterlevnad av bruksanvisningen.

8. Säker avfallshantering

8.1 Innebörden av den "överkorsade soptunnan" Skydda vår miljö! Elektriska apparater hör inte hemma i hushållsavfallet! Använd de insamlingsställen som är avsedda för kassering av elektriska apparater och kassera dina elektriska apparater som du inte längre behöver. Detta kommer att hjälpa till att undvika de potentiellt negativa effekterna på miljön och människors hälsa till följd av felaktig kassering. Därmed gör du ditt bidrag till återanvändning, återvinning och andra former av återvinning av WEEE. Information om var utrustningen måste omhändertas, kan erhållas genom att kontakta din kommun eller de kommunala myndigheterna.

9. Certifieringar

9.1 CE-DEKLARATION ORIGINAL

9.2 EASY UP från Handigood är registrerat för säker kassering och återvinning i flera länder i Europa. EU:s regler om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning finns i det så kallade WEEE-direktivet, som ändrades 2012 (EU-direktiv 2012/19 / EU) WEEE-direktivet uppmanar alla EU:s medlemsstater att införa regler för insamling och behandling samt återvinning av WEEE.

Tyskland - WEEE-registreringsnummer: DE 75187910

Frankrike - WEEE-registreringsnummer: FR 528423

Norge - WEEE-registreringsnummer: NO 1022

Danmark - WEEE-registreringsnummer: DK xxxxxxxx

Sverige – WEEE-registreringsnummer: SE xxxxxxxx

9.3 Övrigt för ER-450 och ER-470 (laddningsbara enheter) Efterlevnadscertifiering för det angivna VEK nätverkskort / strömförsörjning 12V: (Se Handigood.dk för fullständig rapport)

Generalagent i Sverige:
Hjälpmedelsteknik Sverige AB
Tenngatan 2
234 35 Lomma
info@hjalpmedelsteknik.se
Tel: 040-41 07 80 (vxl)

HANDI
GO  **D**